



# DeLaval OCC chemicaliën set

DeLaval OCC chemicaliën set voor gebruik met de DeLaval OCC. Een apparaat om het celgetal erg nauwkeurig te meten. Deze set bevat alle verbruiksmaterialen die nodig zijn voor het meten van het celgetal van individuele koeien met het OCC-systeem.

- Real-time extreem nauwkeurige celgetalmeting in automatische melksystemen
- Geeft u een gemakkelijke manier om de uiergezondheid te controleren
- Helpt subklinische mastitis in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen



## DeLaval OCC chemicaliën set

De DeLaval OCC chemicaliën set bevat een reinigingsoplossing, een kleuroplossing en een afvalcontainer. Zonder deze onderdelen kan de DeLaval Online Cell Counter niet werken. De set is voldoende voor ca. 6.000 metingen (vervang de kit wanneer deze opgebruikt is).

Gebruiksaanwijzing	Tijdens het melken in de VMS wordt een melkmonster genomen. Dit melkmonster wordt samen met de kleurstofoplossing in de Online Cell Counter gezogen. Het aantal cellen wordt gemeten in de OCC. Het melkmonster wordt vervolgens in de afvalcontainer gegooid en de OCC-meter wordt gespoeld met water. Na elke 25 metingen wordt de OCC-meter gereinigd met de reinigingsoplossing.
Dosering	Een set bevat ca 6.000 metingen (ongeveer 0,25 ml kleuroplossing per meting). Per reinigingscyclus wordt ongeveer 4 ml reinigingsoplossing verbruikt.
Bewaring	Bewaar de DeLaval OCC chemicaliën set tussen 4-6°. Vermijd contact met direct zonlicht. Bewaren in de gesloten originele doos of in de OCC-kast.
Houdbaarheid	9 maanden