

# DeLaval online celltalsräknare OCC – kemikaliesats



## Kemikaliesats till OCC i VMS

### Art nr

92086065

DeLaval online celltalsräknare OCC kemikaliesats för DeLaval OCC installationer. Utrustning som upptäcker subkliniska mastiter.

DeLaval online celltalsräknare OCC är installerade i DeLaval VMS-stationer. Den indikerar nivån på celltalen i mjölken, och därav juverhälsan på korna.

En frisk kos celltal ligger normalt mellan 150.000-200.000 per ml mjölk. Ett ökat antal celler kan i de flesta fall resultera i juverinflammation.

OCC-utrustningen fungerar endast om kemikaliesatsen är installerad i utrustningen. Kemikaliesatsen måste bytas ut när det är förbrukat.

## Komponenter

- diskmedel, 1L
- reagensvätska, 1,6L
- spillvätskebehållare

6000 mätningar i 1 sats

## Användarinstruktioner

- Mjölksprov tas från VMS
  - Mjölksprovet och reagensvätskan blandas i OCC
  - Celltalen mäts i OCC
  - Mjölksprovet spolats ut i spillvätskebehållaren
  - OCC-mätaren sköljs med vatten
  - Vid var 25:e mätning, diskas OCC-mätaren med diskmedel
- 
- 6000 mätningar per sats – ca 0,25 ml reagensvätska per mätning
  - Åtgång per diskning – ca 4 mm diskmedel

## Förvaring

- Förvaras i 4-6°C
- Undvik kontakt med solljus
- Håll lådan stängd eller förvara i OCC-kabinettet

## Hållbarhet

- 6 månader efter tillverkningsdatum