


# DeLaval Plus

## Análisis de Comportamiento

### ¿Cómo poner y asignar crotales BA?

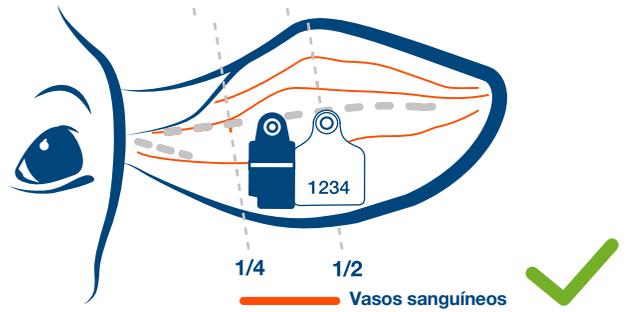

#### Colocación correcta de los crotales BA

Coloca el crotal BA en la parte interior de otros crotales pero no en el 1/4 interior de la oreja. Deja al menos 0,5 cm de espacio entre los crotales, para permitir la ventilación y la correcta cicatrización. El crotal BA debe fijarse donde no haya vasos sanguíneos ni tejido cartilaginoso grueso o crestas cartilaginosas (en rojo en la ilustración).

#### Colocación incorrecta de los crotales:



Sigue estos pasos para poner y asignar un crotal BA a una vaca:

- 1.** Asegurar la vaca, para evitar que se mueva.
- 2.** Enciende el lector de mano HHR5000 y sincronízalo con Companion en tu teléfono móvil.
- 3.** Pulsa el botón de menú en el HHR5000 para leer la ISO de la vaca o B-transpondedor para que aparezca la tarjeta de vaca.
- 4.** Pulsa el botón gris "+". Avanza hasta la última pantalla y selecciona el icono de crotal BA.
- 5.** Pulsa el botón "+" del Companion de tu móvil.
- 6.** Sostén el crotal BA en la parte posterior del lector de mano, donde se encuentra la parte plana - para activar y asignar el tag a la vaca.
- 7.** Con el equipo limpio y desinfectado, coloca el crotal BA en la oreja limpia y desinfectada, utilizando el alicate de crotales suministrado con tu sistema.\*

\*La seguridad de los animales y de los trabajadores es primordial a la hora de marcar a las vacas. Por favor, consulta el libro de instrucciones antes de proceder y revisa el vídeo tutorial de Introducción al Análisis de Comportamiento y la Guía del usuario sobre el marcado de vacas en el Centro de ayuda.

MIRA CÓMO FUNCIONA



Contacta con tu distribuidor DeLaval para más información:

[www.delaval.es](http://www.delaval.es)